



SMART
CHOICE

implant**swiss**

IMPLANT TECHNOLOGY

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ СИСТЕМЫ IMPLANTSWISS

Переключение Платформ

Защищает альвеолярную кость

КОНИЧЕСКОЕ СОЕДИНЕНИЕ С ШЕСТИГРАННЫМ ИНДЕКСОМ

Создает плотное соединение имплантата с абатментом. connection.

Структура без микро-резьбы

Гигиеническая пришеечная зона

Легко поддерживать гигиену

SRA ПОВЕРХНОСТЬ

После пескоструйной обработки поверхность имплантатов подвергается технике двойного кислотного травления.

Саморезающие грани


Уникальная конструкция резьбы, не передающая напряжение на кость.

Улучшенный дизайн резьбы

Безопасный апекс

ГИБРИДНЫЙ ДИЗАЙН

Гибридный дизайн представляет из себя сочетание конической и цилиндрической форм.

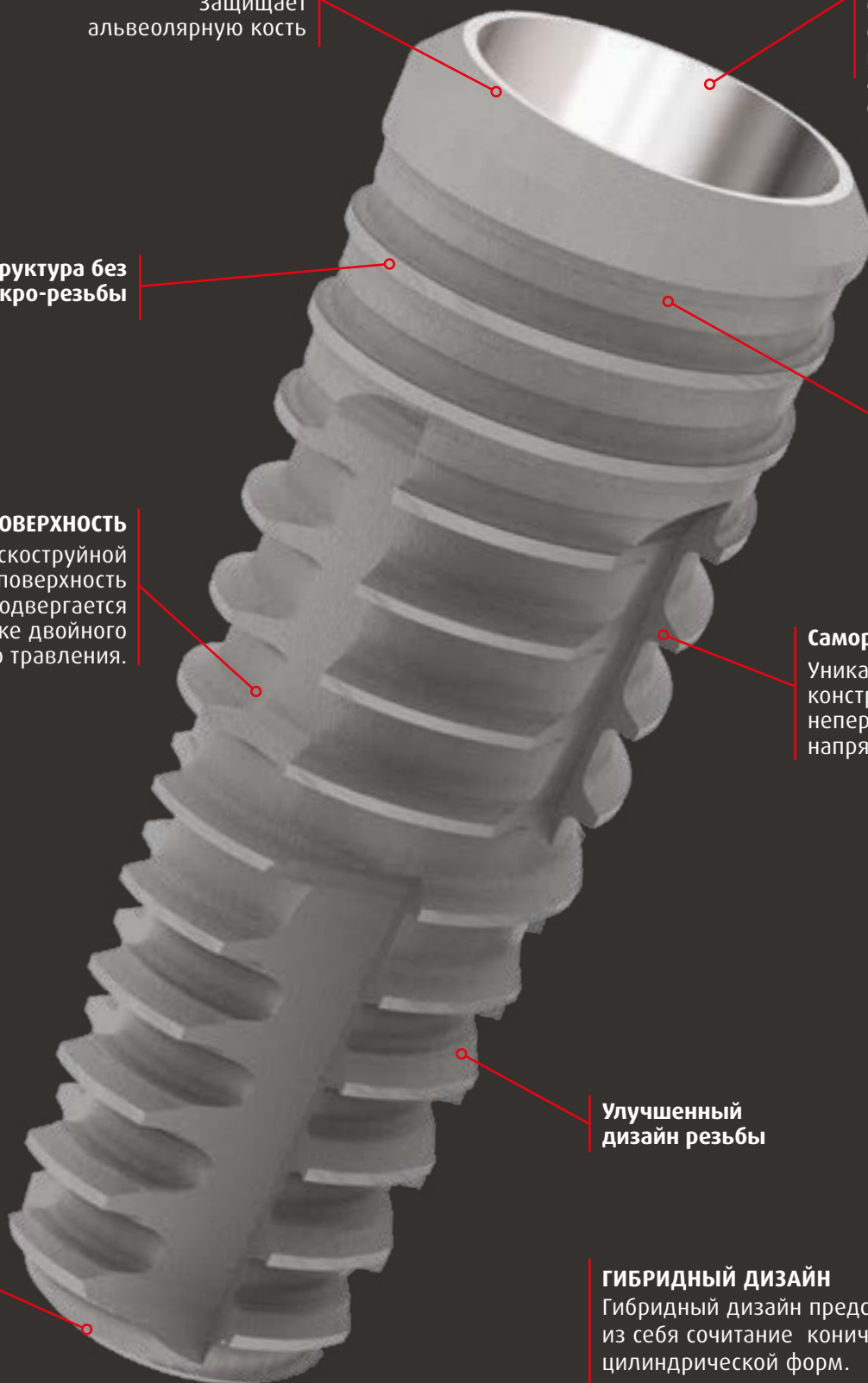

ИМПЛАНТАТЫ НА УРОВНЕ КОСТНОЙ ТКАНИ ЛИНЕЙКИ BONE LEVEL




Имплантаты на уровне кости линейки Bone Level предназначены для обеспечения отличного результата при любом типе кости и в любой зоне челюсти, а так же дают возможность достичь превосходных эстетических результатов.

Длина	Ø3.3	Ø3.7	Ø4.3	Ø4.8	Ø5.5
8.0 мм	S-BMFSR3308	S-BFHR3708	S-BFHR4308	S-BFHR4808	S-BWFHR5508
10.0 мм	S-BMFSR3310	S-BFHR3710	S-BFHR4310	S-BFHR4810	S-BWFHR5510
12.0 мм	S-BMFSR3312	S-BFHR3712	S-BFHR4312	S-BFHR4812	S-BWFHR5512
14.0 мм	S-BMFSR3314	S-BFHR3714	S-BFHR4314	S-BFHR4814	-

Система » На Уровне Костной Ткани
 Материал » Ti Grade 4
 Драйвер » Драйвер Костного Уровня,
 Мини-отвертка для имплантата 3.3
 Рекомендуемый торк » 35 Нсм

ИМПЛАНТАТЫ НА УРОВНЕ МЯГКОЙ ТКАНИ ЛИНЕЙКИ TISSUE LEVEL

Интерфейс имплантат-абатмента серии имплантатов на уровне мягкой ткани Tissue Level даёт возможность успешно достичь превосходной сохранности как мягких, так и твердых тканей, благодаря дизайну с полированной шейей.

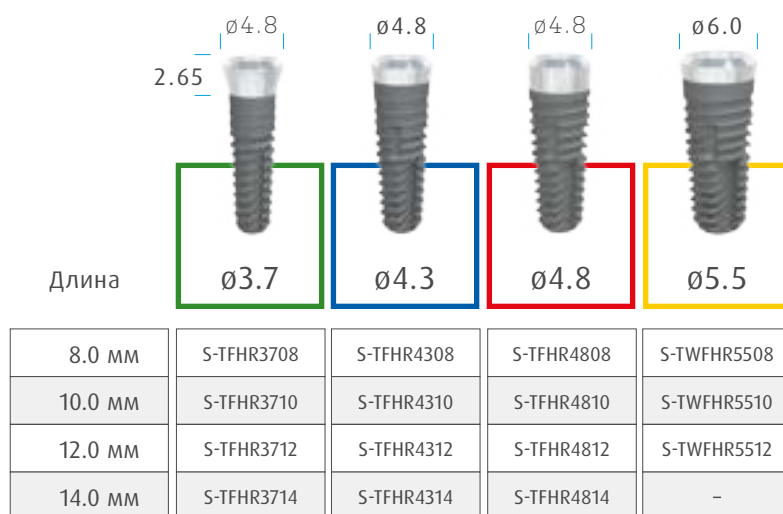

Система » На Уровне Мягкой Ткани
Материал » Ti Grade 4
Драйвер » Драйвер Тканевого Уровня
Рекомендуемый торк » 35 Нсм

КОРОТКИЕ ИМПЛАНТАТЫ

В случаях недостаточного объема кости, над нижнечелюстным каналом или под верхнечелюстными пазухами, короткие имплантаты могут быть альтернативой хирургических вмешательств, направленных на регенерацию твердых тканей.

Короткие имплантаты на уровне костной ткани линейки Bone Level с агрессивным дизайном резьбы могут быть предпочтительны главным образом в верхней челюсти, где альвеолярная кость является относительно мягкой, тогда как короткий имплантат на уровне мягкой ткани Tissue Level может быть хорошим выбором, особенно для нижней челюсти.

КОРОТКИЕ ИМПЛАНТАТЫ НА УРОВНЕ КОСТНОЙ ТКАНИ ЛИНЕЙКИ **BONE LEVEL**

	ø4.3	ø4.8	ø5.5
Длина	ø4.3	ø4.8	ø5.5
5.0 мм	S-BMFSR4305	S-BMFSR4805	S-BMFSR5505
6.0 мм	S-BMFSR4306	S-BMFSR4806	S-BMFSR5506

КОРОТКИЕ ИМПЛАНТАТЫ НА УРОВНЕ МЯГКОЙ ТКАНИ ЛИНЕЙКИ **TISSUE LEVEL**

	ø4.3	ø4.8	ø5.5
Длина	ø4.3	ø4.8	ø5.5
4.0 мм	S-TFSR4304	S-TFSR4804	S-TWFSR5504
5.0 мм	S-TFSR4305	S-TFSR4805	S-TWFSR5505
6.0 мм	S-TFSR4306	S-TFSR4806	S-TWFSR5506

GH » 2.65 мм

СКУЛОВЫЕ ИМПЛАНТАТЫ

Скуловые имплантаты предназначены для случаев, когда традиционные имплантаты не могут быть использованы, а также для тех, кто хочет воспользоваться протоколом немедленной нагрузки даже при наличии минимальной остаточной высоты верхней челюсти.

Скуловые Имплантаты Implantswiss представлены в трёх различных опциях.

СКУЛОВЫЕ ИМПЛАНТАТЫ

Ø4.3



35 мм	S-ZYG35
37.5 мм	S-ZYG37.5
40 мм	S-ZYG40
42.5 мм	S-ZYG42.5
45 мм	S-ZYG45
47.5 мм	S-ZYG47.5
50 мм	S-ZYG50
52.5 мм	S-ZYG52.5
55 мм	S-ZYG55
57.5 мм	S-ZYG57.5
60 мм	S-ZYG60

АТРОФИЧЕСКИЕ ВЕРХНЕЧЕЛЮСТНЫЕ ИМПЛАНТАТЫ

Ø4.3



35 мм	S-ZAM35
37.5 мм	S-ZAM37.5
40 мм	S-ZAM40
42.5 мм	S-ZAM42.5
45 мм	S-ZAM45
47.5 мм	S-ZAM47.5
50 мм	S-ZAM50
52.5 мм	S-ZAM52.5
55 мм	S-ZAM55
57.5 мм	S-ZAM57.5
60 мм	S-ZAM60

ОНКОЛОГИЧЕСКИЕ СКУЛОВЫЕ ИМПЛАНТАТЫ

Ø4.3



25 мм	SZ-ONC25
27.5 мм	SZ-ONC27.5
30 мм	SZ-ONC30
32.5 мм	SZ-ONC32.5

IMPLANTSWISS ХИРУРГИЧЕСКИЕ НАБОРЫ


ХИРУРГИЧЕСКИЙ
НАБОР



ХИРУРГИЧЕСКИЙ
НАБОР ДЛЯ
КОРОТКИХ
ИМПЛАНТАТОВ



ХИРУРГИЧЕСКИЙ
НАБОР ДЛЯ
СКУЛОВЫХ
ИМПЛАНТАТОВ

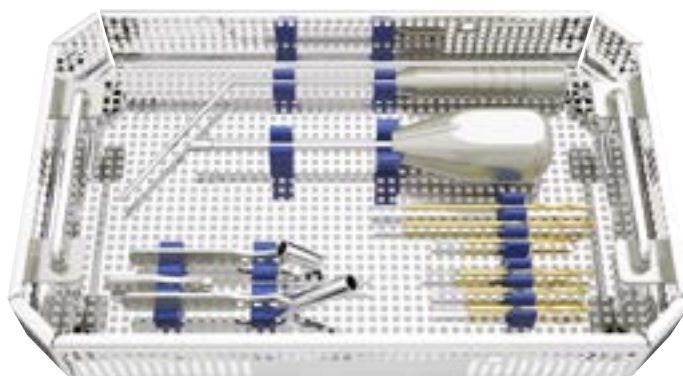

implantswiss.com

NOVODENT SA

Y-Parc Technopole
Avenue des Sciences 11
CH-1400, Yverdon-les-Bains
Switzerland